

KIRURGISTEN INSTRUMENTTIEN HOITO-OHJEET

Uudet instrumentit on hyvä tarkastaa ennen käyttöönottoa. Kun tuotteen on todettu olevan kunnossa, se puhdistetaan ja steriloidaan huolellisesti ennen ensimmäistä käyttöä.



Jokaisen käytön jälkeen kirurgiset instrumentit huolletaan seuraavasti:

- ✓ manuaalinen puhdistus (välittömästi käytön jälkeen)
- ✓ ultraäänipesu
- ✓ tarkastus (ja mahdollinen voitelu)
- ✓ pakkaus
- ✓ sterilointi
- ✓ varastointi seuraavaa käyttöä varten

Huomioi puhdistuksessa:

- ✓ Älä anna ainejäämien (lääkkeet, viskoelastiset aineet jne.) kuivua instrumentteihin
- ✓ Älä käytä syövyttäviä puhdistusaineita. Neutraalit puhdistusaineet (pH 7 tai lähellä) ovat parhaita.
- ✓ Älä hankaa instrumentteja metalliharjalla, metallivillalla tai hankausaineella, ne vahingoittavat instrumenttien pintaa.

Mikäli instrumentteihin ilmestyy värimuutoksia/tahroja, syynä saattaa olla puutteellinen puhdistusprosessi:

- **RUSKEAT/ORANSSIT TAHRAT** - Hangataan tahraa pyyhekumilla, mikäli pinta tahran alla on syöpyntynyt, tahra on ruostetta. Mikäli pinta tahran alla on sileä, se ei ole ruostetta vaan tahra on saattanut syntyä verijäämistä, suolaliuoksesta, kylmästerilointiaineesta tai sopimattomien puhdistusaineiden jäämistä.
- **TUMMAN RUSKEAT/MUSTAT TAHRAT** - Saattavat syntyä verijäämistä, sopimattomista puhdistusaineista tai hapoista.
- **MUSTAT TAHRAT** - Saattavat syntyä altistuksesta hapoille, ammoniakille tai valkaisuaineelle.
- **SINIMUSTAT TAHRAT** - Saattavat syntyä mikäli eri laatuista metalleja prosessoidaan samaan aikaan ultraäänipesurissa tai autoklaavissa.
- **VAALEAT JA TUMMAT PILKUT** - Saattavat syntyä veden mineraaleista mikäli instrumentit ilmakuivataan tai ei ole käytetty demineralisoitua vettä.