



HOITO- JA HUOLTO-OHJEET PMS SAFIIRI- JA TIMANTTI-VEITSILLE

PESE

Huuhtelee timanttiterä välittömästi käytön jälkeen juoksevan veden alla tai tislatus veden ja ruiskun avulla.

PYYHI

Pyyhi timanttiterä varovasti takaa kärkeen nukkaamattomalla kostutetulla sienellä (ref. 37-900).

PUHDISTA

Jos timanttiterä ei ole vielä puhdas, käytä timanttiveitsen puhdistuspallaa (ref. 37-462) lian ja tahrojen poistamiseksi.

ULTRASOONINEN PUHDISTUS

Ultrasoونista puhdistusta ei suositella. Käytettäessä teho tulee rajoittaa pienelle teholle 60 sekunnin ajaksi ja terä tulee olla kahvan sisällä.

TARKASTA

Timanttiterä tulee tarkastaa suurennuslasin alla kärjestä leikkausterään vaurioiden varalta aina ennen sterilointia ja käyttöä.

VEDÄ KAHVAN SISÄÄN

Vedä timanttiterä kahvan sisään suojaan ja laita suojaavaan koriin (ref. E45-002) sterilointia varten.

STERILOI

Timanttiterä voidaan steriloida autoklaavissa kaasulla, flash-steriloinnilla tai höyryllä. Lämpötila ei saa ylittää 273° F/134°C.

SULJE

Pidä aina terä suljettuna ojennatessa toisille tai laitettaessa pois säilytykseen.

KOSKETUS

Varmista, ettei timanttiterä koskaan kosketa mitään metallista pintaa. Mikäli mahdollista, pidä timanttiveitsi erillään muista instrumenteista.

