



1stQ AddOn -linssin latausohje

- ① Avaa injektorin latauskammio ja lisää viskoainetta injektorin kärkeen sekä latauskammion uriin.

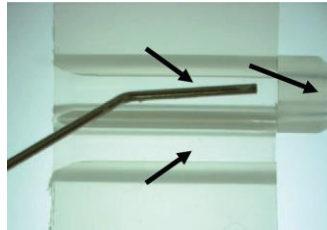

- ⑥ Tarkasta, että linssi on taipunut symmetrisesti ja että se ei ole jäänyt latauskammion lukituksen väliin.

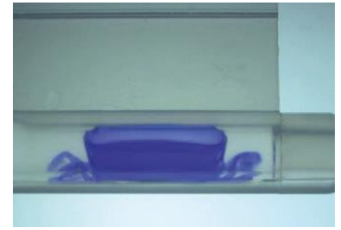


- ② Avaa linssipakkaus kiertämällä oranssi korkki auki ja ota linssi pidikkeestä sopivilla atuloilla.



- ⑦ Lisää viskoainetta linssin taakse sekä männän päähän.




- ③ Aseta linssi injektoriin latauskammion keskelle. Linssin reunoilta löytyvien merkkien avulla voidaan tarkastaa, että linssi on oikein päin.

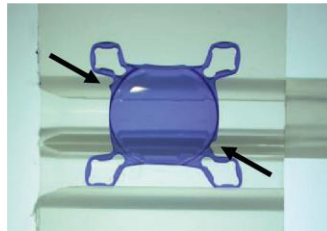


- ⑧ Käytä push-pull tekniikkaa. Työnnä linssi ensin injektorin kapenevaan kärkeen, jonka jälkeen vedä mäntää niin että sen silikonikärki irtoaa linssistä.




- ④ Taita haptiikat varovasti latauskammion sisälle niin, että linssi asettuu käänteiseen U-asentoon. Varmista myös, etteivät haptiikat ole kiertyneet.

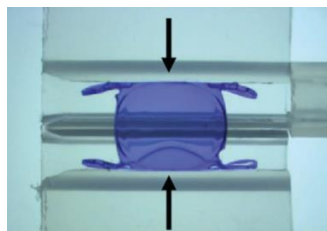

- ⑨ Injektoi linssi hitaasti ja kontrolloidusti.

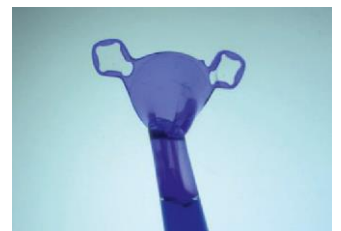


- ⑤ Pidä atuloiden avulla linssi paikoillaan ja sulje latauskammio varovasti, kunnes kuulet naksahduksen ja latauskammio lukittuu. Jos latauskammiota sulkiessa tuntuu vastusta, lataa linssi uudelleen.

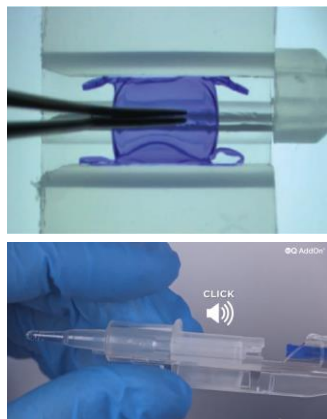

1stQ AddOn -linssin latausohje

OIKEIN

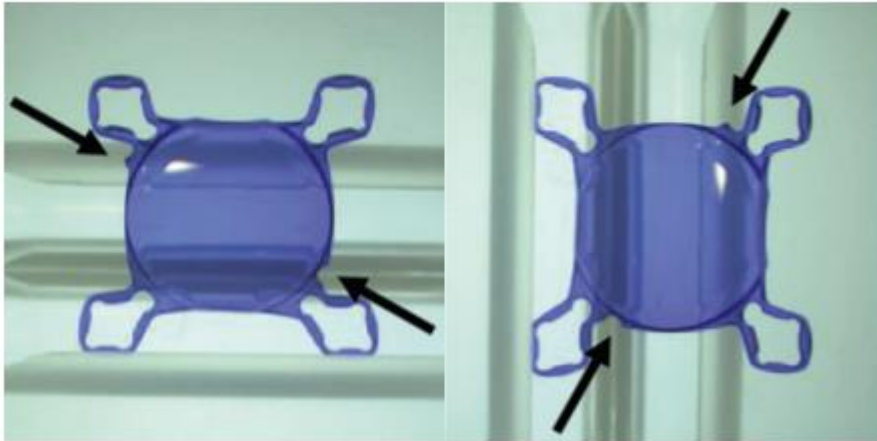

VÄÄRIN

