

ICAREN TONOMETRIEN HUOLTO

iCare tonometri ei vaadi valmistajan määräaikaishuoltoa, mutta sujuvan käytön takaamiseksi tulee säännöllisesti vaihtaa paristot sekä anturin kanta.

Anturin kanta tulee vaihtaa kuuden kuukauden käytön jälkeen.

Uudet anturin kannat (ref. 540) saa tilattua Kuomedista: kuomed@kuomed.fi

Säännöllisellä anturin kannan vaihtamisella voi pidentää huoltoväliä. Anturin kantaan kerääntyy ilmasta rasvaa, hiukkasia ja kosteutta. Likainen anturin kanta hidastaa tai pysäyttää kertakäyttöisen anturin liikkeen ja aiheuttaa lopulta mittarissa virheilmoituksen.

Jos näyttöön tulee Vaihda-virheilmoitus useamman kuin kaksi kertaa peräkkäin anturin vaihtamisen jälkeen, vaihda anturin kanta ennen laitteen käytön jatkamista.

Mikäli laitetta on huollettava muutoin, ota yhteys Kuomedin huoltoon support@huolto.fi.

Anturin kannan vaihtaminen:

- Sammuta tonometri.
- Kierrä anturin kannan holkki käsin irti ja laita se talteen.
- Vedä anturin kanta irti tonometrasta tarttumalla siihen pinsettiotteella.
- Aseta tonometriin uusi anturin kanta.
- Kierrä holkkia, kunnes anturin kanta on tiukasti paikallaan.

Saatavana varaosana myös anturin kannan holkki.

