

## ICARE TONOMETRIEN YLLÄPITO JA HUOLTO

**iCare tonometri ei vaadi valmistajan määräaikaishuoltoa, mutta sujuvan käytön takaamiseksi tulee säännöllisesti vaihtaa paristot ja anturinkanta.**

Kaikki paristot tulee vaihtaa vähintään kerran vuodessa samanaikaisesti. Laite toimii luotettavimmin laadukkailla paristoilla (esim. Duracell).

Anturinkanta tulee vaihtaa kuuden kuukauden käytön jälkeen. Uudet anturinkannat (ref. 540) saa tilattua Kuomedista: [kuomed@kuomed.fi](mailto:kuomed@kuomed.fi)

Säännöllisellä anturinkannan vaihtamisella voi pidentää huoltoväliä. Anturinkantaan kerääntyy ilmasta rasvaa, hiukkasia ja kosteutta. Likainen anturinkanta hidastaa tai pysäyttää kertakäyttöisen anturin liikkeen ja aiheuttaa lopulta mittarissa virheilmoituksen.

Jos näyttöön tulee Vaihda-virheilmoitus useamman kuin kaksi kertaa peräkkäin anturin vaihtamisen jälkeen, vaihda anturinkanta ennen laitteen käytön jatkamista.

Jos laitteessa on patterit ja anturinkanta vaihdettu, ja sen toiminnassa on edelleen vikaa tai jos laitetta on huollettava muutoin, ota yhteys Kuomedin huoltoon [support@kuomed.fi](mailto:support@kuomed.fi).

### Anturinkannan vaihtaminen:

- Sammuta tonometri.
- Kierrä anturin kannan holkki käsin irti ja laita se talteen.
- Vedä anturin kanta irti tonometrasta tarttumalla siihen pinsettiotteella.
- Aseta tonometriin uusi anturin kanta.
- Kierrä holkkia, kunnes anturin kanta on tiukasti paikallaan

Saatavana varaosana myös anturinkannan holkki.

